

保証書付

CITIZEN
Micro HumanTech

取扱説明書

シチズン電子血圧計

CH-657F

- ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねています。紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。



シチズン・システムズ株式会社

目次

使いかたと付属品..... 1

ご使用のまえに

安全上のお願い..... 3
各部のなまえと機能..... 5
電池を入れます..... 7

測定しましょう

手首カフを巻きましょう..... 9
正しい姿勢を確認しましょう.. 11
測定しましょう..... 13
測定結果を確認しましょう..... 15
測定結果の呼び出しかた..... 17
保管とお手入れのしかた..... 19

お知らせ

エラー表示について..... 21
血圧Q&A..... 23
血圧について..... 25
測定結果を記録しましょう.... 27
血圧測定の基本事項..... 29
故障かな?と思ったら..... 31
製品仕様..... 32
保証規定・保証書.....裏表紙


使いかた

2ステップでカンタン測定
毎日測って健康管理に役立てましょう!!

ご使用のまえに ● 電池を入れます


 7ページ参照

1

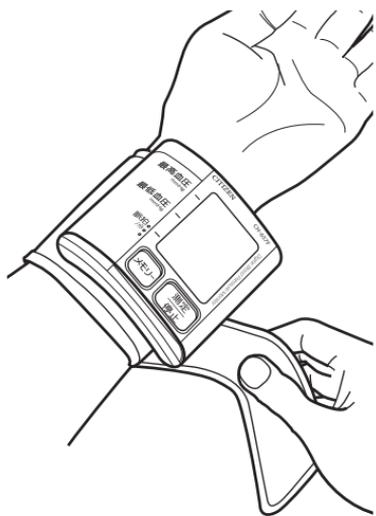

手首カフを巻きます

2

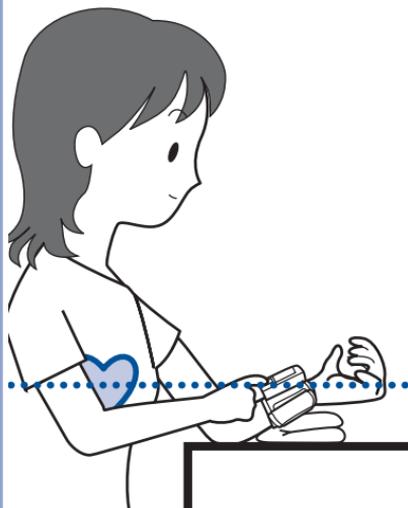


●●●●●
心臓の高さに合わせて

測定
停止


を押し、測定を開始します

付属品

収納ケース

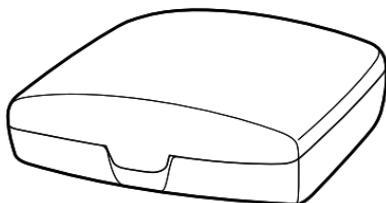

単 4 アルカリ
乾電池 2 本
(モニター用)

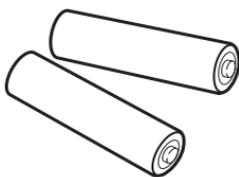

取扱説明書
(保証書付)



安全上のお願い

ご使用の前に、この「安全上のお願い」をよくお読みください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合



注意

人が傷害を負う可能性が想定される場合



強制 必ず実行していただく「強制」内容です。



禁止 してはいけない「禁止」内容です。



警告



強制

測定結果の自己判断、および治療は危険です。
必ず医師の指導に従ってください。

→ 自己判断は、病気の悪化につながる恐れがあります。



強制

心臓疾患、その他循環器疾患、
重度の血行障害のある方やペースメーカーをご使用の方は、医師の指導に従ってください。

→ 体調不良をおこす恐れがあります。



⚠ 注 意



禁止

乳幼児や意思表示ができない方へのご使用はおやめください。

→ 事故やけがの原因になります。



禁止

長時間連続して測定しないでください。

→ うっ血、はれなどの原因になります。



禁止

血圧測定以外に使用しないでください。?

→ 事故やけがの原因になります。



禁止

血圧計の近くで、携帯電話を使用しないでください。

→ 誤作動をおこす恐れがあります。



禁止

電池の液が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

→ けがなどの原因になります。



禁止

電池の⊕ \ominus の向きを間違えないようにしてください。

古い電池と新しい電池、種類のちがう電池を同時に使用しないでください。

→ 漏液、発熱、破裂などを起こし、本体が破損する原因になります。



分解禁止


分解・修理・改造をしないでください。

→ 事故やけがの原因になります。



各部のなまえと機能

本 体

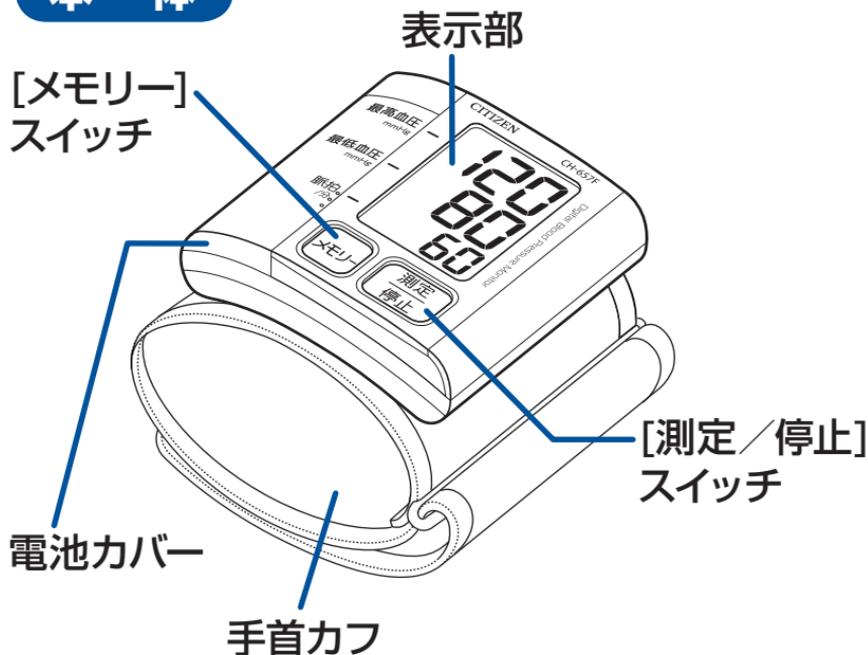

ご使用のまえに

収納ケースの開け方

以下の手順に従って、収納ケースから製品を取り出してください。


① 収納ケースのツメに親指をかけます。



② 収納ケースのツメを手前に引きながら、ふたを持ち上げます。



表示部

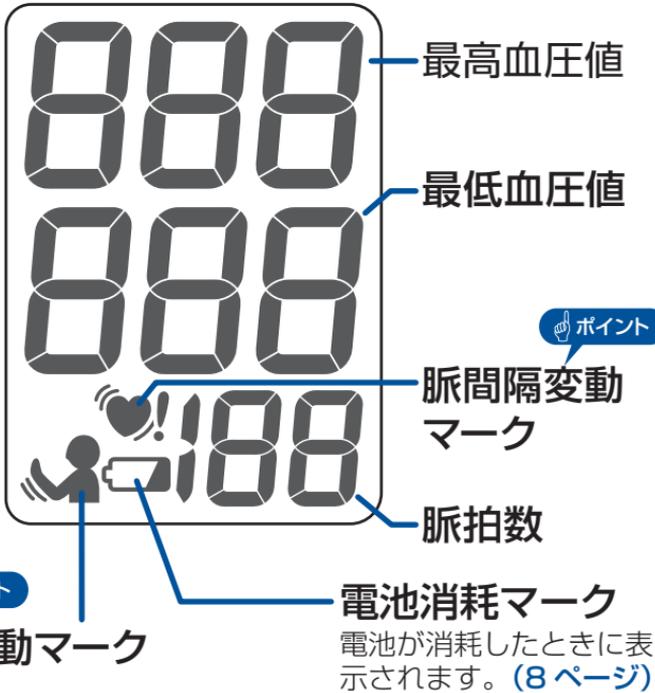

ご使用のまえに



こんな機能があります 詳しくは15ページ参照


体動マーク ……測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出したときに表示されます。

脈間隔変動マーク …測定中の脈間隔が不規則な場合に表示されます。

電池を入れます

まず電池を入れましょう

1 電池カバーをはずします

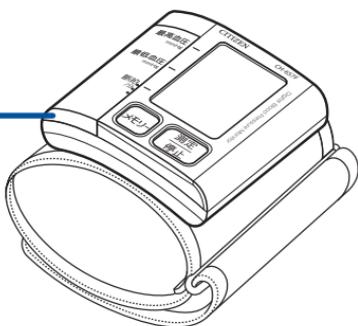

電池カバー



電池カバーを押さえながら、矢印方向にずらします

2 電池を入れます

⊕⊖の向きに注意して入れてください。


※ 必ずバネの出ている⊖側から入れてください。

奥側の電池から入れてください



3 電池カバーを閉めます

カバーを押さえながら矢印方向にずらします。「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

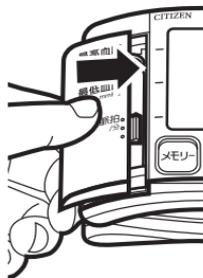


こんなときは電池を交換しましょう

 マークが表示されたとき


 を押しても何も表示されなくなったとき

→ 2本同時に
交換しましょう

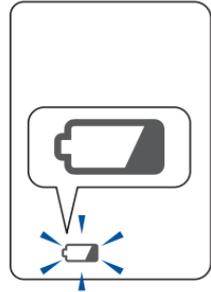

電池を取り出すときは・・・

電池カバーをはずし、電池を取り出します。

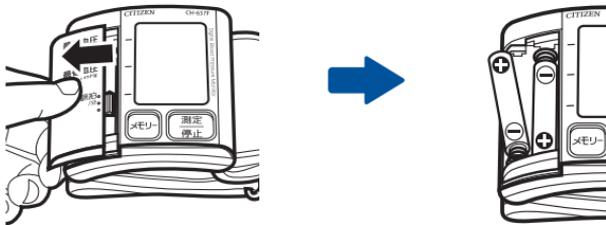

注 意

- 単4アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- 充電式の乾電池は使用しないでください。
- 付属の乾電池はモニター用ですので、所定の電池使用回数を満たさない場合があります。
- ご使用済みの乾電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。

手首カフを巻きましょう




ポイント!!

- 腕時計などはずしましょう。
- 上着のそでをまくり上げるときは、腕が圧迫されないようにしてください。
- 手首周囲が13.5cm未満の方、21.5cmを越えた方が測定した場合、正しく血圧を測定できない場合があります。



1 手首カフを広げます

手首カフを筒状に広げます。

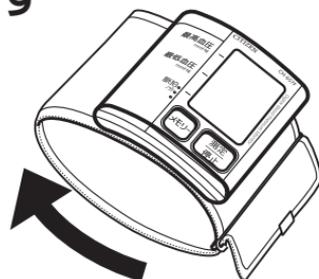

2 手首カフを左手首に通します


表示部を手のひら側にしてください。手首に通したら、手首カフの端をひっぱります。

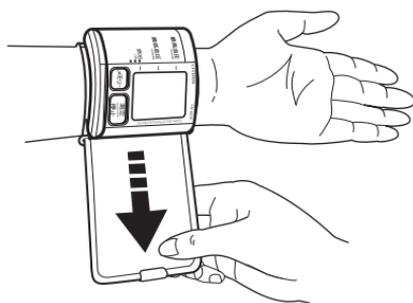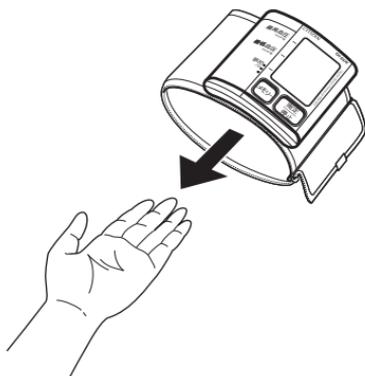

手首カフを巻きましょう


3 位置を確認します

手首のすじから1~2cm
のところに手首カフの縁を
合わせます。

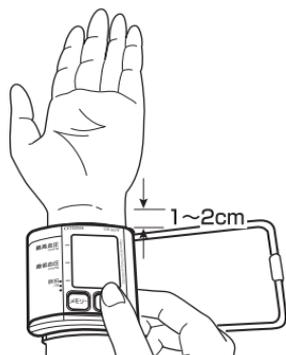

4 手首カフをぴったり巻きつけます

手首カフの端を引いて、ぴったり巻きつけます。

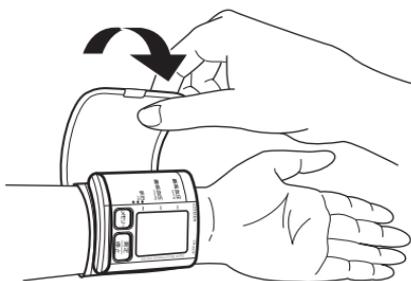

測定しましょう

右手首でも測定できます

ただし、血圧は左右で10mmHg程度の差が出る場合がありますので、毎回同じ側の手首で測定してください。



ポイント 正しく測定するためには・・・

- 巻き付けがゆるすぎたり、締め付けすぎると、正しく測定できないことがあります。
- 測定する時は正しい姿勢をとりましょう。(11ページ)

正しい姿勢を確認しましょう




○血圧は測定するときの姿勢や時刻によって変化します。毎日同じ時刻に、正しい姿勢で測るよう心がけることが大切です。

1 姿勢を整えましょう

背筋をのばし、深呼吸してリラックスしましょう。

2 手のひらを上に向けて、力を抜きましょう

3 血圧計を心臓と同じ高さにしましょう

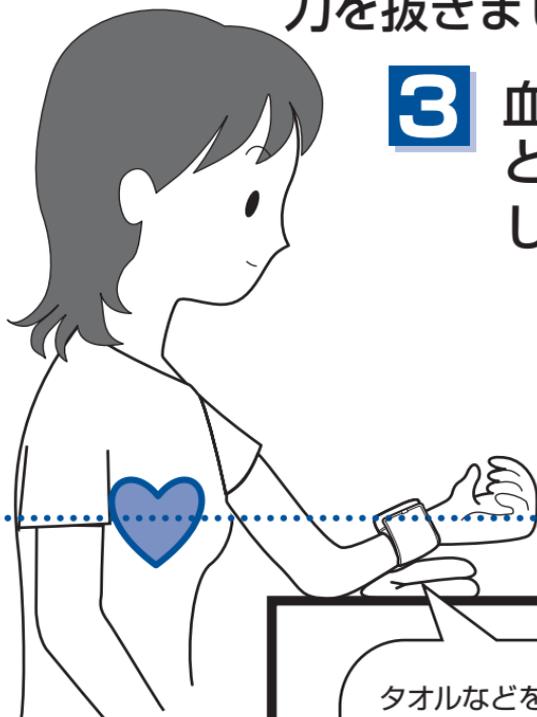


タオルなどを折りたたんで腕の下に置きましょう。

正しい姿勢を確認しましょう


ポイント 正しく測定するためには



- 手を強く握りしめない。

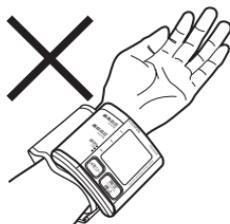

- 手首カフをゆるまないように巻く。

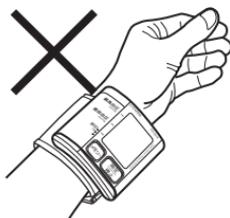

- 本体の位置をずらさない。



- 測定中に動いたり話したりしない。

そのほかのポイントについては、

29ページ「血圧測定の基本事項」を参考にしてください。

測定しましょう



ポイント!!

測定する前に・・・

○きちんと手首カフを巻いてください。

([P.9ページ](#))

○正しい姿勢で測定しましょう。([P.11ページ](#))


1

測定
停止

を押して測定を
開始します




脈拍を感知すると測定マーク♥が点滅します。

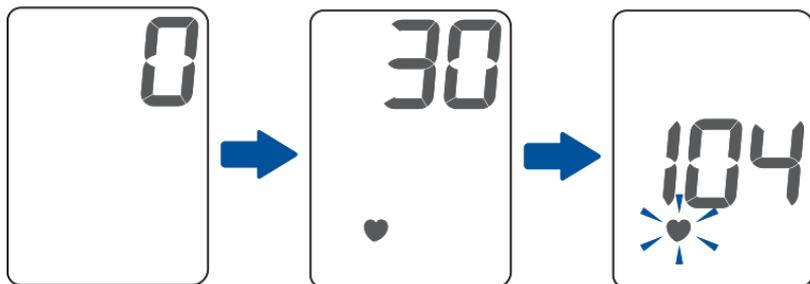

測定しましょう

2 測定結果が表示されます

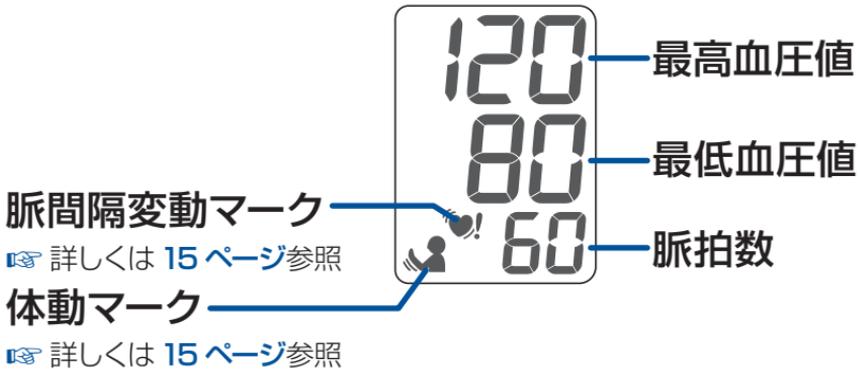

測定結果は自動的に記録されます。

測定結果の呼び出し方については17ページを参照してください。

測定しましょう

血圧は毎日測って測定値を記録しましょう

血圧は、長期のデータを見ることが大切です。お薬（降圧剤等）を服用した時間も考慮して、1日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。

27 ページに「血圧記録用紙」があります。
コピーしてお使いください。



測定結果を確認しましょう

体動マークについて



「体動マーク」は、測定中に手や手首などが動いて大きな圧力変化を検出された場合、測定結果の画面に表示されます。

- 「体動マーク」が表示された場合は再測定してください。

脈間隔変動マークについて



測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」が表示されます。

- 測定中の脈の間隔が大きく変動すると正しく測定できないことがありますので、「脈間隔変動マーク」が表示された場合は再測定してください。

⚠ 注 意

- 「脈間隔変動マーク」が頻繁に表示される場合は、ご自身の健康状態について医師に相談してください。

測定結果を確認しましょう

1

測定後、
ります



を押して電源を切



※ 測定後に電源を切り忘れても、約3分後に、
自動的に電源が切れます。

測定
しまし
よう

測定結果の呼び出ししかた

測定結果を呼び出してみましょう


90回分の測定結果を記録できます。

平均値も自動的に計算されますので、日々の健康管理にお役立てください。

1

メモリー

を 1 回押します

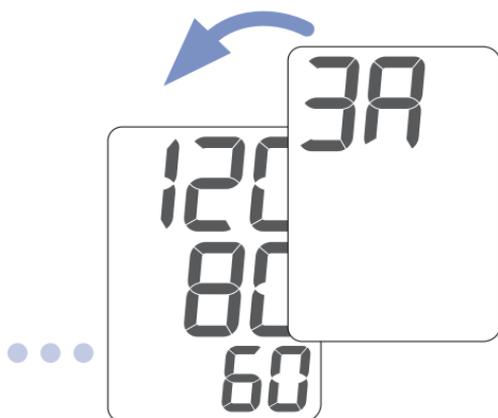


平均値を示す「3A」を表示したあと、最新3回分の各測定結果の平均値を表示します。

※ 3回以上測定しなければ、平均値は表示しません。


2 さらに **メモリー** を押すと、過去の測定結果を表示できます

スイッチを押すたびに、前回、前々回とさかのぼります。

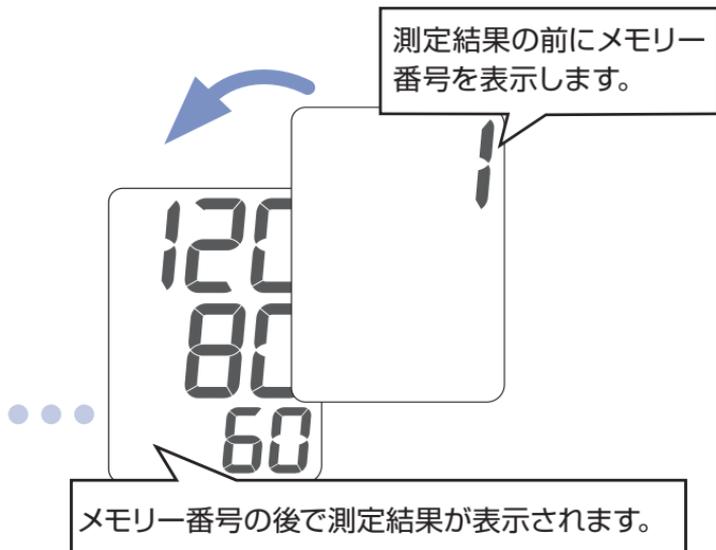

※メモリー消去のしかた


1. **メモリー** を押します。
2. **メモリー** を押しながら、**測定停止** を3秒以上押します。
記録されているすべての結果が消去されます。

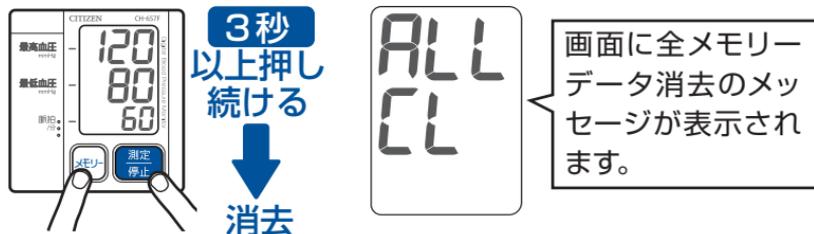

保管とお手入れのしかた

- 直射日光が当たる場所、高温や多湿の場所に保管しないでください。

故障の原因となります。

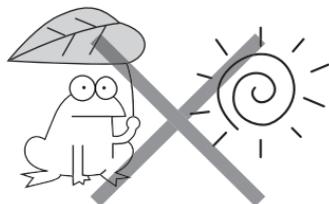

- 長期間使用しない場合は、電池はずしてください。

電池からの液漏れにより、故障することがあります。




- 本体をシンナーやベンジンなどで絶対に拭かないでください。

本体の材質を傷める恐れがあります。



- 手首カフを無理やり曲げたり、引っ張ったりしないでください。

加圧不良の原因となります。

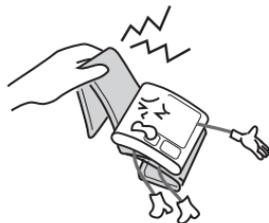


保管とお手入れのしかた

- 塩分や硫黄分の多い場所、埃の多い場所、水のかかる場所には保管しないでください。また、水洗いもしないでください。故障の原因となります。



- 本体に無理な力を加えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。

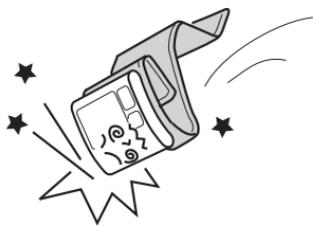

- 本体がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。




- 本体を廃棄するときは、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処分してください。




エラー表示について

測定ができない!!

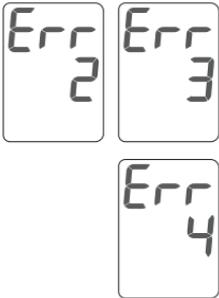エラー表示	原因	対処
	手首カフの巻きかたが緩すぎます。	手首カフを巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。 (9ページ「手首カフを巻きましょう」参照)
	測定中に手首が動きました。 手首カフが正しく巻かれていませんでした。	手首カフを巻きなおし、安静にしてもう一度測定してください。 (9ページ「手首カフを巻きましょう」参照)

エラー表示について

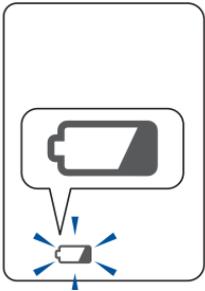エラー表示	原因	対処
	乾電池が消耗しています。	2本とも新しいアルカリ乾電池と交換してください。 (7ページ「電池を入れます」参照)
	脈拍数が測定範囲外 (39拍/分以下、または181拍/分以上)でした。	手首カフを巻きなおし、深呼吸などリラックスメしてから、もう一度測りなおしてください。(脈拍数が測定範囲外の場合はEr表示になります。)

質問



病院で測ってもらう血圧値と
家で測る血圧値がちがうのはなぜですか？

A
答え

病院では、不安や緊張感から、家庭で測るよりも10～20mmHgほど高くなることがあります。家庭での測定で、普段からご自分の血圧の傾向を知っておくと診察の際に役立ちます。

質問



測るたびに血圧値がちがいますが
なぜですか？

A
答え

次のように、さまざまな要因で血圧は変動します。

- 季節、気温
- 体のリズム、体調、姿勢、運動
- 精神状態、ストレス

ストレスや感情の起伏といった精神的な影響も受けやすく、緊張すると高くなり、リラックスすると低くなる傾向にあります。

また、正しい姿勢で測定していない場合や、手首カフを正しく巻いていない場合にも、変動しやすくなります。

質問

家庭で血圧を測る意味は？

Q

A
答え

家庭ではリラックスした状態で測定できるため、より安定した血圧を測定できるからです。
毎日同時刻に測定して日々の血圧の変化を記録し、その結果を基に、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。

質問

上腕の血圧値とかなりちがいますが
なぜですか？

Q

A
答え

手首と上腕の血圧値の差は、高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化、抹消血管障害などがある方の場合、健康な方より大きな差がでることがあります。運動や入浴直後の測定や正しい姿勢で測定しなかった時なども大きな差がでることがありますので、自分で判断せずに必ず医師の指導にしたがってください。


お知らせ

血圧について


血圧とは…

血液は、心臓の収縮と拡張によって血管に送られます。このとき、心臓から送られた血液によって血管壁（血管の内側の壁）にかかる圧力が「血圧」なのです。

【最高血圧とは】

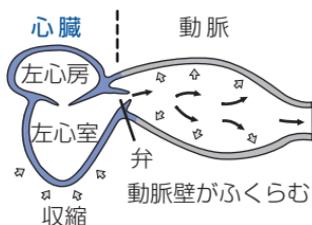

【最低血圧とは】

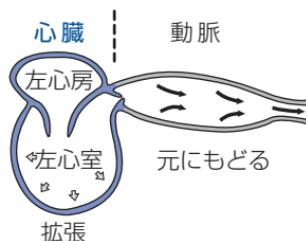


心臓が収縮して血液が送り出されるとき、血管壁にかかる圧力が「最高血圧」です。心臓が拡張して血液が戻ったとき、血管壁にかかる圧力が「最低血圧」です。

血圧の変動

血圧は、自律神経の働きによって調整され、心臓の動きに合わせて一拍ごとに変化しています。健康な方でも1日の間に大きく変動するといわれています。そのため、連続して測ったとしても午前と午後、季節や気温などによって血圧値は違ってきます。

下の図は、日常生活における1日の血圧の変動の一例です。

【血圧の日内変動の一例】

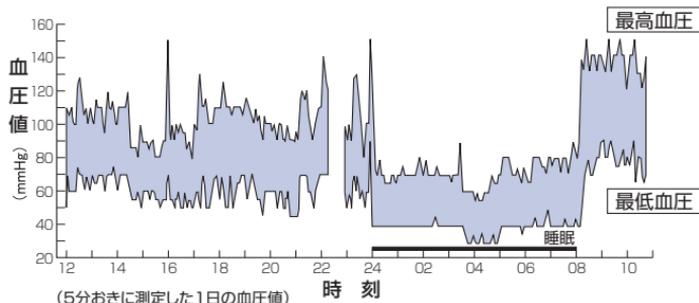

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329-44.

日本人の血圧の平均値

日本人の血圧の平均値を示します。
個人差もあるため、あくまで目安として、ご自分の血圧を判断するときの参考にしてください。

出典：厚生労働省 『平成 17 年国民健康・栄養調査報告』による

	年 代	平均値 (mmHg)	
		最高血圧	最低血圧
男 性	15～19歳	115.0	69.7
	20～29歳	121.2	74.6
	30～39歳	121.6	78.1
	40～49歳	126.8	83.4
	50～59歳	131.2	84.6
	60～69歳	136.8	83.6
	70歳以上	142.3	81.5
	全 体	131.1	81.5
女 性	15～19歳	104.5	63.8
	20～29歳	107.0	65.8
	30～39歳	111.9	70.8
	40～49歳	121.3	77.3
	50～59歳	129.1	81.5
	60～69歳	134.0	81.6
	70歳以上	141.7	79.1
	全 体	125.5	77.5

注) 降圧剤服用者、妊婦を除く。

測定結果を記録しましょう

血圧記録用紙

※コピーしてお使いください

●：最高血圧 ○：最低血圧

年 月

日 付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
測定時刻																			
血圧値 (mmHg) 記入例	<p>250</p> <p>200</p> <p>150</p> <p>100</p> <p>50</p> <table border="1"> <tr> <td>64</td> <td>67</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>かぜ薬</td> <td>発熱 37.5°C</td> <td></td> </tr> </table>													64	67	62	かぜ薬	発熱 37.5°C	
64	67	62																	
かぜ薬	発熱 37.5°C																		
脈拍数 (拍/分)																			
× 毛																			

お知らせ

血圧測定の基本事項

血圧を測る前に5～6回深呼吸をし、リラックスした状態で測定してください(緊張したり不安定な精神状態のときは、血圧が安定しません)。



心配ごとやイライラがあるとき、睡眠不足や便秘のとき、また運動や食事の直後でも血圧は高くなります。



入浴や飲酒の後では測定を行わないでください。




尿意や便意があるときは、排尿や排便をすませてから測定してください。



血圧測定の基本事項

コーヒーや紅茶を飲んだり喫煙した直後には測定を行わないでください（血圧が高くなります）。

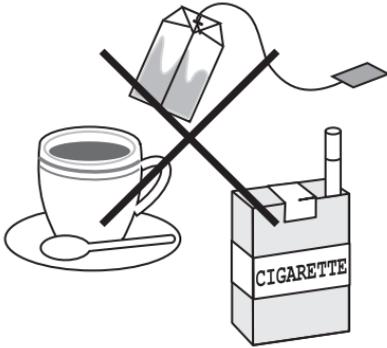

楽な姿勢で安静にして測定してください。血圧計を心臓の高さに保ち、腕を動かしたり、話をしたりしないでください。



連続して測定を行わないでください。手首がうっ血して、正しい値が得られません。



20℃前後の室温で測定してください（寒さは血圧を上昇させます）。



お知らせ

故障かな？と思ったら

修理、サービスに出される前に、次の点をご確認ください。

こんなとき	確認するところ	直しかた
[測定/停止] スイッチを入れても何も表示しない	乾電池が消耗していませんか	新しい乾電池と交換してください
	乾電池の⊕⊖の向きが間違っていないですか	乾電池を正しい向きにしてください
測定できない	♥マークが点灯しましたか	手首カフを正しく巻いてください
	手首カフを正しく巻いていますか	手首カフを正しく巻いてください
	測定中は安静にしていますか	安静にしてもう一度測定してください
	脈の極端に弱い方、不整脈のある方は測定できない場合があります	

◆故障を発見した場合はただちに使用を中止し、勝手に分解などせず、販売店または

シチズン・システムズ株式会社
お客様相談室
にお問い合わせください。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社 お客様相談室 でお受けいたします。

受付時間：10～17時
月～金（祝祭日、年末年始を除く）



0120-88-6295

通話料金は無料です。



E-mail: support@systems.citizen.co.jp
<http://www.citizen-systems.co.jp>

製品仕様

販売名	シチズン電子血圧計 CH-657F
測定方式	オシロメトリック法
表示	デジタル表示方式
手首周長	13.5~21.5cm (測定可能手首周長範囲)
測定範囲	圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
測定精度	圧力: ±3mmHg、脈拍: 読み取り数値の±5%
加圧	ポンプによる自動加圧
排気	電磁弁による自動排気
定格および電源	DC3V (--- 直流)、単4アルカリ乾電池2本
電池使用回数	400回 (1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
使用温湿度	10℃~40℃/相対湿度30%~85%
保存温湿度	-20℃~60℃/相対湿度10%~95%
メモリー	90回分
電撃保護	内部電源機器  ( : B形)
寸法	幅69×高さ70×奥行15mm (手首カフ含まず)
質量	86g (電池含まず)
付属品	単4アルカリ乾電池2本 (モニター用)、取扱説明書 (保証書付)、収納ケース

- ※ 本製品、及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに基づいて正しく処理してください。
- ※ 本製品はEMC規格IEC60601-1-2:2001に適合しています。 **EMC適合**
- ※ 本製品はJIS規格 (JIS T 1115:2005) に適合しています。
- ※ 本製品の臨床性能試験は、「医療用具の承認申請に際し留意すべき事項について (平成11年7月9日)」に基づいて実施しております。
- ※ 本製品は在宅での自己血圧測定に使用するものです。医療機関・公共の場所で使用しないでください。
- ※ 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する事があります。

医療機器認証番号 221ADBZX00035000
(管理医療機器)

製造販売元

シチズン・システムズ株式会社

お知らせ

保証規定

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- 誤ったご使用またはお取扱いによる故障または損傷。
 - 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書のご購入日、ご購入店名などの記載に不備がある場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品の交換。
- ※ご購入の販売店または弊社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にてご負担願います。
- 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 持込修理

CITIZEN
Micro HumanTech

このたびは、シチズン 電子血圧計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えて、ご購入の販売店または弊社までご持参ください。保証期間内に限り、無料にて修理・調整させていただきます。お客様にご記入いただいた本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売名 シチズン電子血圧計 CH-657F

お客様お名前 様 TEL - -
ご住所 〒

※以下につきましては、必ず販売店にてご記入、ご捺印をお願いいたします。

ご購入日 年 月 日

ご購入店

保証期間 ご購入日より1年間

製造販売元 シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

検査証：本製品は弊社の定められた検査に合格しております。

0901

商品に関するご相談、お問い合わせは、
弊社お客様相談室でお受けいたします。

シチズン・システムズ株式会社
お客様相談室

受付時間：10～17時

月～金（祝祭日、年末年始を除く）



0120-88-6295

通話料金は無料です



E-mail: support@systems.citizen.co.jp

http://www.citizen-systems.co.jp