

添付文書（必ずご参照ください）

認証番号：第218AKBZX00077000号

2006年9月1日(新様式第1版)

類別：機械器具81磁気治療器


管理医療機器 一般的名称：家庭用永久磁石磁気治療器(JMDNコード 71016000)

ジキベルト

【禁忌・禁止】

ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療電気機器、または脳脊髄液短絡術用可変シャフトなどの医療用電気機器を使用している人は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

【形状・構造等】

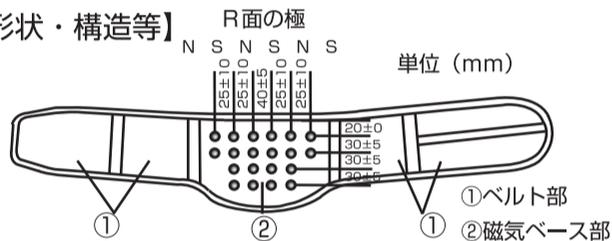

1. 構成

・本体・添付文書

2. 本体の寸法及び重量

・寸法：最大幅17×長さ80～115cm ・重量：約125g

3. 磁石寸法 個数

・磁石寸法：幅 14 ± 3 ×高さ 6 ± 3 mm 磁気個数：20個

4. 動作原理

・永久磁石の磁力を利用して、人体に磁力線を浸透させて治療します。

【使用目的・効果又は効能】

・装着部位の、「こり」、及び「血行」の改善とし、一般家庭での磁気治療に使用する機器であること。

【品目仕様等】

・最大磁束密度： 100 ± 15 mT

【操作方法又は使用方法等】

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

【使用方法】

下記①～④の手順でご使用ください。

- ① ご使用前に、本製品の身体側になる面をお確かめください。
(組み込まれた各永久磁石が、丸く確認出来る面が身体側です。)
- ② 本製品が組み込まれた永久磁石が身体側、腰部になるよう、腰にまいてください。
- ③ 腰からはずれないように巻き、左右の面ファスナー(ワタッチ)をお腹側で重ね合わせ、取り付けてください。この状態がご使用中となります。
- ④ ご使用後は、重ね合わせた左右の面ファスナー(ワタッチ)を引き剥がして、取り外してください。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や下記の人には必ず医師と相談の上ご使用ください。
(ア) 悪性の腫瘍のある人
(イ) 心臓に傷害のある人

(ウ) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人

(エ) 糖尿病などによる高度な末梢循環器障害による知覚障害のある人

(オ) 皮膚に感染症及び/又は創傷のある人

(カ) 安静を必要とする人

(キ) 体温 38°C 以上(有熱期)の人

例1. 急性炎症症状〔けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期

例2. 衰弱しているとき

(ク) ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性〔とう(疼)痛〕疾患の人

2. 他の治療機器と同時に使用しないでください。

3. 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

4. 使用する前には次のことにご注意ください。

(ア) 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。

(イ) 製品に破れなどがなければ点検、磁石の装着部に破れなどがある場合は使用しないでください。

(ウ) しばらく使用していなかったときは、表面に金属などの異物が吸引付着していない事を確認して下さい。

5. 使用中には次のことにご注意ください。

(ア) 機器に故障が発見された時は、使用を直ちに中止してください。

(イ) 身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。

(ウ) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた時は、使用を直ちに中止してください。

【取扱い上の注意】

1. 使用后、保管には次のことにご注意ください。
機器を破棄する時には、お住まいの市町村の破棄方法に従ってください。
2. 機器の故障及び取扱いには次のことにご注意ください。
(ア) 機器は改造しないでください。
(イ) 機器の故障は、販売店又は製造販売元にご連絡ください。

【保守・点検に係る事項】

・常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、点検修理を依頼してください。

【包装】

・1包装に1枚入り 製造販売業者

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：浅井商事株式会社
住 所：大阪府大阪市大正区小林西1丁目28-4
電 話：06-6555-7889
製 造 業 者：浅井商事株式会社 大正工場

添付文書を必ずご参照ください